

# Dale Abdominaal Steunverband met Exclusief Stretchmateriaal

Het Dale abdominale steunverband ondersteunt de buikspieren, stimuleert de mobiliteit en bevordert hernieuwde spierontwikkeling.

Het steunverband is volledig vervaardigd van het exclusieve stretchmateriaal van Dale. Hiermee is om het even waar een klittenbandsluiting mogelijk voor een meer nauwkeurige en comfortabele pasvorm. Gelijkmatic verdeelde compressie bevordert hoesten en diep ademen. Patiënten kunnen comfortabeler lopen, waardoor de kans op sedentaire complicaties zoals atelectase, pneumonie en flebitis kleiner wordt.

## Gebruiksindicaties

Het Dale abdominale steunverband biedt ondersteuning en comfort na procedures zoals:

- Keizersnede
- Hysterectomie
- Liposuctie
- Gastroplastiek
- Abdominoplastiek
- Bevalling
- Abdominale Stomaoperatie

## Belangrijkste Kenmerken

- **Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.** Geen zorgen meer over overgevoeligheid voor latex bij patiënt of verzorger.
- **Nieuwe innovatieve naadsteek.** Steken zonder tussenruimte bieden meer comfort voor de patiënt.
- **Gelijkmatic verdeelde compressie.** Het exclusieve stretchmateriaal van Dale verdeelt de compressie gelijkmatig rondom het lichaam, zonder op te kruipen, op te rollen of in te snoeren.
- **Levensduur van het product.** Het materiaal kan een groot aantal keren worden vast- en losgemaakt. Het materiaal kan pluizig worden, maar eigenlijk verbetert dit de houdkracht.
- **Klittenbandsluiting.** Het steunverband kan snel en gemakkelijk worden geopend en gesloten voor wondverzorging en inspectie. Om het even waar op de omtrek van het steunverband is een klittenbandsluiting mogelijk voor een nauwkeurige pasvorm.
- **EasyGrip-strip.** Kan tot vier drainageballonnen op hun plaats houden aan de buitenkant van het abdominale steunverband.
- **Mogelijkheid om gaten in te knippen** voor drains, voedingssondes en stoma's.

## Bestelinformatie

Dale abdominale steunverbanden zijn verkrijgbaar bij leveranciers van ziekenhuis-/medische benodigdheden. Ze zijn apart verpakt.

Om de juiste maat te vinden, meet u bij vrouwen de heupomtrek, bij mannen de lendenomtrek.

<b>525</b>	2 panelen	15cm (6 inch) breed; past omtrek van 72-127cm (28-50 inch) bij uitrekken*
<b>410</b>	3 panelen	23cm (9 inch) breed; past omtrek van 76-114cm (30-45 inch) bij uitrekken
<b>411</b>	3 panelen	23cm (9 inch) breed; past omtrek van 117-157cm (46-62 inch) bij uitrekken
<b>418</b>	3 panelen	23cm (9 inch) breed, past omtrek van 152-191cm (60-75 inch) bij uitrekken
<b>810</b>	4 panelen	30cm (12 inch) breed; past omtrek van 76-114cm (30-45 inch) bij uitrekken
<b>811</b>	4 panelen	30cm (12 inch) breed, past omtrek van 117-157cm (46-62 inch) bij uitrekken
<b>818</b>	4 panelen	30cm (12 inch) breed; past omtrek van 152-191cm (60-75 inch) bij uitrekken
<b>820</b>	4 panelen	30cm (12 inch) breed; past omtrek van 183-239cm (72-94 inch) bij uitrekken
<b>920</b>	5 panelen	38cm (15 inch) breed; past omtrek van 183-239cm (72-94 inch) bij uitrekken

\*kan ook worden gebruikt als ribbel

Voor gebruik bij één patiënt.

# Dale<sup>®</sup>

Medical Products

**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
www.dalemed.com

**EC REP MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany

**CH REP MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland



Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK. EasyGrip is een handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. Octrooi www.dalemed.com/patents ©2024 Dale Medical Products, Inc. 942155 REV G

## Met EasyGrip™ -Strip

# Dale<sup>®</sup> Abdominaal Steunverband




met Exclusief Stretchmateriaal


Dutch

# Het Dale Abdominale Steunverband Aanbrengen


Dale abdominale steunverbanden zijn in verscheidene maten verkrijgbaar. Er kunnen twee steunverbanden worden samengevoegd voor patiënten met grote buikomvang.

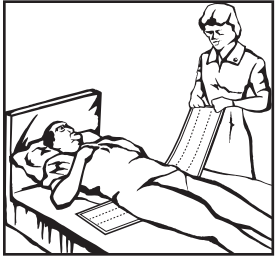


1. Plaats het steunverband onder de patiënt met het haakmateriaal omhoog gericht en de V-punt omlaag gericht, en trek één uiteinde strak. Goed straktrekken zorgt voor de nodige compressie.

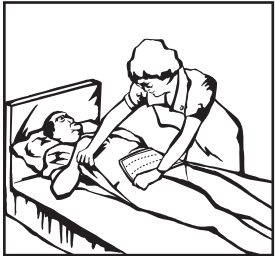

2. Trek het steunverband strak over de buik van de patiënt en houd het met één hand vast. Het steunverband kan recht of onder een hoek worden geplaatst als extra druk op de boven- of onderbuik nodig is.

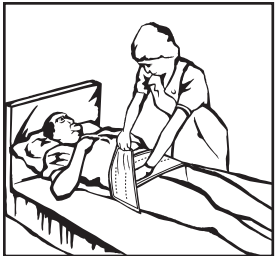

3. Sla het andere uiteinde onder de gewenste hoek om terwijl u het straktrekt.



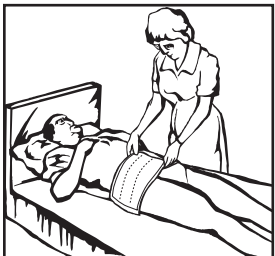


4. Druk stevig op het haakmateriaal terwijl u het neerwaarts straktrekt om het te sluiten.


Zorg dat u het steunverband voldoende straktrekt. Denk eraan dat een goede pasvorm de ademhaling niet belemmert. Straktrekken en compressie vergemakkelijken in feite diepe ademhaling.

# Ondersteuning voor Drains, Voedingssondes en Stoma's


Er kan een gat in het Dale abdominale steunverband worden ingeknipt voor een drain, voedingssonde of stoma. Plaats het steunverband zodanig op de patiënt dat er slechts één laag over de plaats van de drain of sonde ligt. Markeer de stof met een X op de plaats waar het gat moet worden ingeknipt, maak een vouw in de stof en maak een ovale insnijding in het materiaal (zie afbeelding). Wanneer de stof wordt strakgetrokken, wordt de ovale insnijding een ronde opening voor de drain of sonde. De diameter van de opening is gelijk aan de lengte van de insnijding. Zie de achterkant voor het gebruik van de EasyGrip-strip.

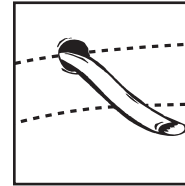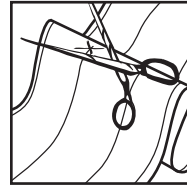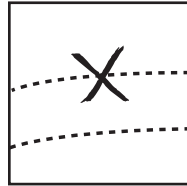


## Het Steunverband zelf Aanbrengen

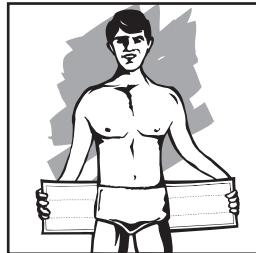

1. Plaats het steunverband met de bovenrand net onder de navel en de V-punt omlaag gericht. Trek het steunverband zijwaarts strak.

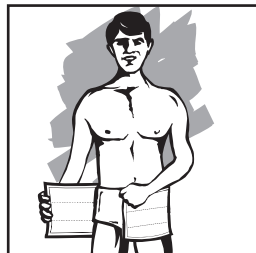


2. Trek het steunverband strak terwijl u het omslaat.

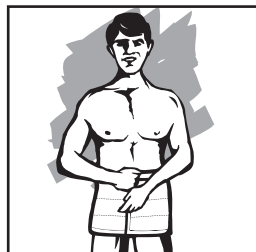

3. Druk het steunverband dicht om het vast te zetten.

# †De EasyGrip-strip Aanbrengen

## 1. Verwijder de EasyGrip-strip van het steunverband

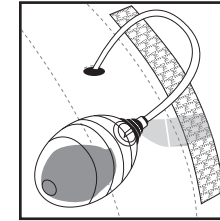

Voor gebruik met een drainageballon steekt u de EasyGrip-strip door het lipje van de drainageballon en bevestigt u de strip opnieuw aan het steunverband. De EasyGrip-strip kan worden bijgeknipt voor meer opties bij het vastzetten van drainageballonnen.

†Volg altijd best practices voor drainageapparatuur.

## Wassen en Onderhoud

 Machinewas\*


 Of Handwas

 Geen bleekmiddel gebruiken

 Aan de lijn drogen

In de machine of op de hand wassen\* met een mild detergens. Alvorens het steunverband te wassen, dient u te zorgen dat de klittenbandsluiting goed vastzit om ophoping van pluisjes te voorkomen. Pluisjes kunnen de vezels verstoren en hun sluitende eigenschappen verzwakken. Aan de lijn drogen.

\*(tot 40-60°C/104-140°F)

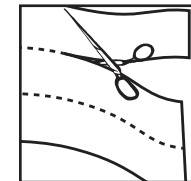

\* Als het steunverband te breed is, kunt u panelen verwijderen door tussen de panelen te knippen.